

Mover stockt/bleibt stehen

Sollte der Mover während der Fahrt auf der Stage stehen bleiben oder ruckeln, müssen vorab folgende Checks durchgeführt werden:

1. Es gilt zu prüfen, dass der Boden keine Unebenheiten aufweist UND der Scanner mit allen seinen Füßen bzw. der ganzen Unterseite gleichmäßigen Kontakt zum Boden hat. (Es sollte also geprüft werden, dass die Platte nicht z.B. auf einem Stromkabel oder USB-Kabel liegt.)
2. Die silbernen Räder bzw. die Unterseite des Movers überprüfen: Der Mover sollte sich von Hand frei und leicht auf der Platte hin- und herschieben lassen.
3. Wurde der Scanner längere Zeit vertikal gelagert könnte sich der Antriebsriemen verklemmt haben; um diese Verklemmung zu lösen, würde es genügen den Scanner in alle 4 Richtungen hochkant zu verkippen.

Falls die obigen Punkte keine Lösung erbracht haben, muss der Zahnriemen der Stage ausgewechselt werden.